

Mise à jour du 16.04.2020

Instructions d'entretien, mode de lavage, de séchage et de repassage.

Le **masque barrière à usage non sanitaire de catégorie 2 AFNOR SPEC S76-001 :2020 Textile Alsace** est conçu pour être réutilisable. Il résiste au minimum à 5 cycles complets de lavage (Mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes à 60 °C.

Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble.

Le cycle complet suivant doit être réalisé consécutivement dans sa totalité, afin de garantir une élimination des virus du type du COVID-19 mais également d'autres microorganismes potentiellement pathogènes :

Mode de lavage - Il est recommandé avant tout lavage des masques barrière de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C.

NOTE : l'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée.

Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l'aspect mécanique du lavage.

Mode de séchage - Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques barrière ne doivent pas sécher à l'air libre. En blanchisserie industrielle, il convient d'utiliser les sècheurs et sècheuses. Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un sècheur et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les cas, les masques barrière doivent être séchés complètement (c'est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.

NOTE : il n'est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes.

Repassage – Il est recommandé un repassage à une température de 120/130 °C.

Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.

Jeter un masque barrière

Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d'un sac plastique, de préférence avec couvercle et à commande non manuelle. Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.

Utilisation du masque barrière

Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé. Ne jamais remettre en place un masque qui a été retiré du visage.

La durée de port du masque barrière :

Elle sera inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).

Usage d'un masque barrière : ce qu'il faut éviter !

La liste suivante comprend des exemples d'utilisation du masque barrière qu'il faut éviter et qui est nourrie des retours d'expériences recensés :

- a/ Le masque barrière **ne peut pas** être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques.
- b/ Le masque barrière **ne doit pas** être congelé. L'agent viral est conservé et à 4°C il ne perd pas son caractère infectieux.
- c/ Les **règles de distanciation sociale** doivent être respectées malgré le port du masque barrière.

Notice d'utilisation Masques Eurométropole de Strasbourg Modèle 2

